


Вакуумно-роликовый массаж.

Аппарат Starvac SPOriginal / S'One

Модели: Starvac SPOriginal, Starvac S'One

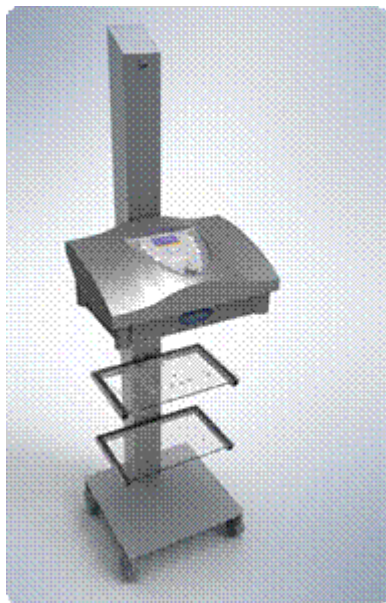

Starvac SPOriginal/Starvac S'One – многофункциональный аппарат для вакуумно-роликового массажа, эндермотерапии и локальной вакуум-терапии.

Эндермотерапия – это воздействие местной вакуум-декомпрессии и роликового массажа. Благодаря вакуумному разряжению, образуется кожная складка, которая при помощи двух внутренних подвижных роликов «перемещается» по направлению движения манипулы. Такое двойное воздействие вызывает временное расширение венозных и лимфатических сосудов и улучшает лимфоотток из тканей. В результате происходит ускоренный вывод токсинов и жидкости из межклеточных пространств. За счет дополнительного насыщения тканей кислородом активизируются процессы липолиза.

Лечебные факторы:

- эндермотерапия;
- локальная баротерапия (вакуум-декомпрессия).

Варианты процедур:

- вакуумно-роликовый массаж
 - вакуумно-роликовые насадки двух типоразмеров
- баночный динамический массаж
 - вакуумные банки различного диаметра для работы по телу
 - округлые и овальные насадки различного диаметра для работы на лице
- баночный статический зональный массаж
 - автоматический режим: банки двойного всасывания без отверстия с возможностью одновременного использования 4/2 банок
 - автоматический режим: вакуумные банки без отверстия для использования в режиме пульсирующего массажа
 - ручной режим: вакуумные банки с отверстием
- точечный массаж (рефлексотерапия).

Встроенное программное обеспечение (Starvac SPOriginal):

- Лечебные программы (17 программ):
 - «Ревматология» («Неврология»): боли в различных отделах позвоночника (4 программы),
 - мышечные и суставные боли в верхних конечностях (4 программы),
 - мышечные и суставные боли в нижних, конечностях (3 программы),
 - «Травматология» (3 программы): растяжение связок, гематомы, рубцы,

- «Спорт» (3 программы): мышечный болевой синдром, мышечная усталость, утомление, мышечная скованность, тендиниты.
- Косметологические программы (7 программ):
 - «Целлюлит» (2 программы: «мягкий», «плотный» целлюлит),
 - «Лимфодренаж»,
 - «Рефлекторный лимфодренаж»,
 - «Релаксирующий массаж»,
 - «Тяжелые ноги»,
 - «Лицо».
- Собственная программа.

Индивидуальная настройка параметров процедуры:

- интенсивность вакуума,
- интенсивность захвата кожной складки,
- длительность процедуры: от 1 до 60 мин (Starvac SPOriginal), 30/45 мин (Starvac S'One).

Показания к применению:

- Патология опорно-двигательного аппарата (застойно-ишемические и фиброзно-рубцовые изменения мягких тканей, миофасциальный болевой синдром, остеохондроз позвоночника, сколиоз, артриты и артрозы, последствия травм костно-мышечной системы, устранение мышечной усталости, гематомы).
- Неврологические расстройства (невриты, невралгия, люмбаго, головные боли, вертебробазилярная недостаточность).
- Косметические дефекты (коррекция целлюлита, моделирование фигуры, устранение локальных жировых отложений, лифтинг кожи лица, коррекция морщин, рубцы, стрии, подготовка к оперативным вмешательствам).

Технические характеристики

	Starvac SPOriginal (стационарный)	Starvac S'One (портативный)
Длина:	57 см	28,5 см
Ширина:	46 см	24,0 см
Высота:	50 см (без тележки), 116 см (на тележке)	13,0 см
Масса:	27,5 кг	3,6 кг
Диапазон регулирования вакуума:	80-800 мбар	50-600 мбар
Частота разрежения:	0-5 Гц	0; 0,8; 1,2; 2,2; 2,5 Гц
Скважность:	10-90%	60%; 100%
Характер вакуума:	постоянный, пульсирующий	постоянный, пульсирующий
Питание:	220 В, 50-60 Гц	220 В, 50-60 Гц